

Underhållsschema

Imes-icore CORiTEC

Utföres av:

<p>Vid start av maskin</p> <ul style="list-style-type: none">• Varmkör alltid spindeln före start <i>C:\SmartControl\Documents\SmartControl_calibration\</i>• Rengör diskhållare, verktyghållare, verktygsskaften på alla verktyg, längdmätaren, inuti maskinen.• Kontrollera, rengör eller byt ut filter.• Kontrollera och rengör silen i kylmedelsbehållaren vid behov.• Kontrollera och fyll vid behov på kylvätska.• Visuell kontroll av kablar och slangar.• Kontrollera för eventuella läckor på kylmedelstanken.	Operatör
<p>Daglig skötsel</p> <ul style="list-style-type: none">• Kontrollera vattenavskiljaren vid tryckluftsingången, töm vid behov.• Kontrollera dörrar och luckor för korrekt funktion.• OBS! Tänk på att göra rent maskinen noga när ni byter från torrt till vått eller från vått till torrt!	
<p>Veckovis skötsel</p> <ul style="list-style-type: none">• Rengör styrskenorna för skyddsdörren*• Inspektera chuck för synliga skador.• Rengör chuck enligt anvisning.• Smörj chuck enligt anvisning.• Byt chuck om den har synliga skador eller slitage.• Rengör säkerhetslås på skyddsdörren.• Rengör eller byt filter till fläkt.• Byt kylvätska enligt serviceintervall.• Byt eller rengör filter i botten på maskinen.	
<p>2-veckors intervall</p> <ul style="list-style-type: none">• Rengör joniserare försiktigt med pensel.	
<p>6-månaders intervall</p> <ul style="list-style-type: none">• Test av jordningsmotstånd.• Byte av slitna delar vid behov.	Auktoriserad personal (Specialist)
<p>Årsvis</p> <ul style="list-style-type: none">• Service av maskin	Auktoriserad servicetekniker

* Gäller endast Loader maskiner.



FORSTEC DENTAL AB

Malmö Address Box 288, SE-201 22 Malmö, Sweden | Visit Ridspögatan 6, SE-213 77 Malmö, Sweden

Phone + 46 40 755 45 | OpenMill +46 40 31 75 45 | Support +46 10 500 61 90 | Service +46 40 755 40 | Fax + 46 40 611 38 70

Stockholm +46 8 611 55 45 | Forshaga +46 54 87 53 00

info@forstec.se | forstec.se